


V21系列病房分机使用手册

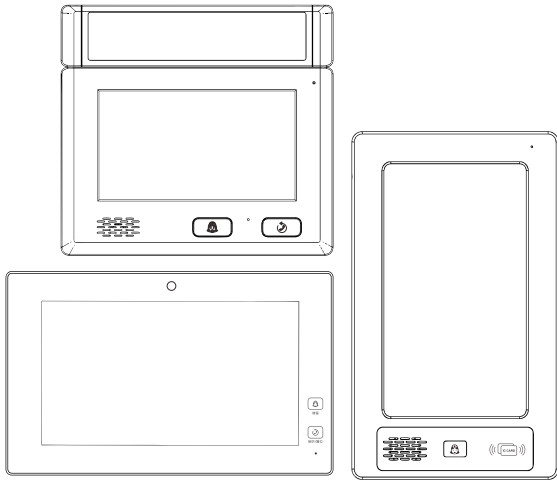

欢迎选用我公司的病房分机产品！



1/2/3病床分机是一款非可视对讲终端，外观简洁大方，体积小，支持呼叫对讲、护理、紧急支援，指示灯状态功能。

二、号码设置

进入病房号设置功能，正确输入该病房门口机的号码，按确认键系统提示设置成功并自动重启。如果输入号码不在房号表中，则系统显示“号码不存在”；如果号码没改变，则系统显示“设备号码无修改！”。
 温馨提示：房号要根据房号表填写，每台病房门口机设备都会分配一个固定IP，且设备IP都不相同，设置正确的房号后系统将自动更改设备IP地址。

三、安装说明


1、7寸病房分机安装说明

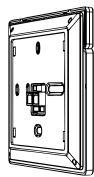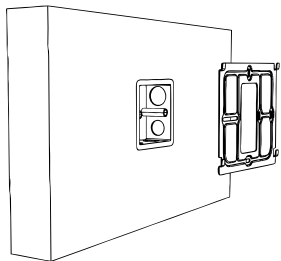

一、安装设备

- 1.将2颗M4*20mm的螺丝将挂板固定在86盒上。
- 2.将设备后盖的安装孔对准挂板挂钩后扣上，并往下拉即可固定设备，拆卸则相反。

2、10.1寸病房分机安装说明

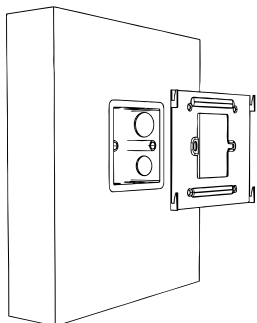


一、安装设备

- 1.将2颗M4*25mm的螺丝将挂板固定在86盒上
- 2.将设备后盖的安装孔对准挂板挂钩后扣上，并往下拉即可固定设备，拆卸则相反


装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

序号	名称	数量	
1	病房分机	1台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1张	
4	配件包	1套	配件包单独包装，内含：挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同，以实物为准。

一、产品简介

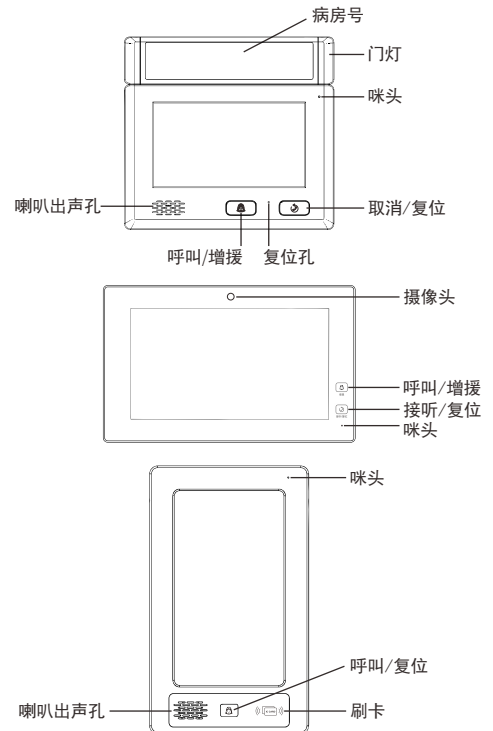

3、10.1寸竖屏病房分机安装说明

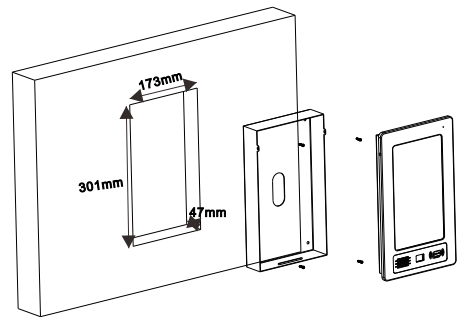

一、墙面开槽

- 1.按照图纸尺寸在墙面上开槽


二、安装门口机预埋盒

- 1.将预埋盒放进槽里，用4颗6*27mm的塑料膨胀胶塞打入墙中
- 2.再用4颗 KA4x8mm 自攻沉头十字头固定好预埋盒


三、安装门口机

- 1.将线槽的电源线等功能线接口插到门口机上
- 2.将门口机倾斜一定角度，对准卡钩后往下拉即可（拆卸则方向相反）
- 3.最后在设备左右两侧安装2颗沉头自攻螺丝 M3x10mm

四、接口接线说明

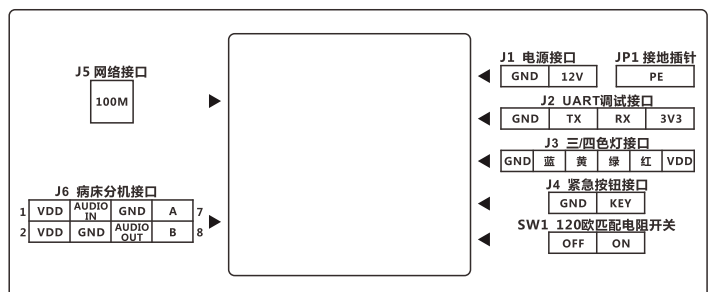


五、技术参数

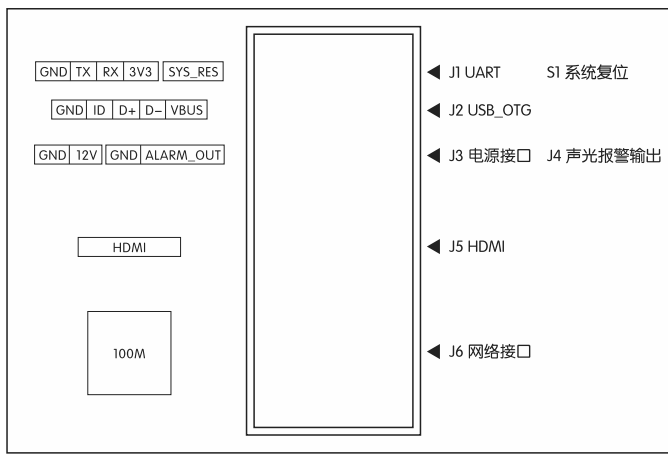

2

产品型号	1	2	3
供电电源	DC12V		
供电电压	DC12V		
最大功率	5W	10W	
工作温度	-10° C to 50° C		
工作湿度	10% to 95%		
联网接口	RJ45 10M/100M		
安装方式	86盒安装		
整机尺寸	212.2*195.2*21.5	287*179*23.7	181*305*53
整机尺寸	-		

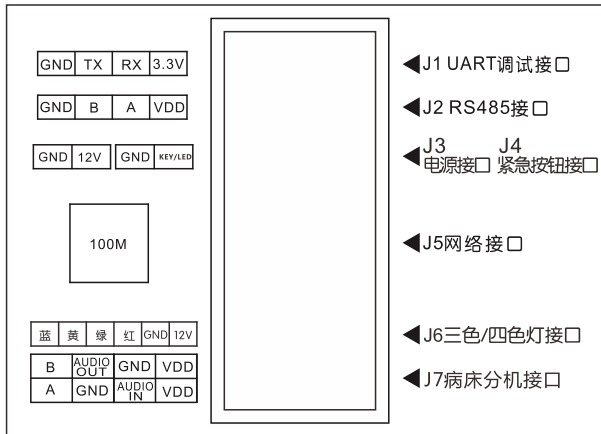

3

六、故障分析与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	屏幕无显示，触摸屏幕可点亮屏幕	设备进入待机状态	通过护士站软件下发亮屏时间区间
2	设备时间不同步（不正确）	护士站软件没有打开	在护士站的电脑上打开护士站软件，并保持运行状态
3	数模系统无法接听病床呼叫	数模系统中无法接听当前病房下的病床分机发起的呼叫	换一个其它房分机即可接听
4	病人出院和更换医生护士后，病房分机上的信息没有	护士站软件没有打开	在护士站的电脑上打开护士站软件，并保持运行状态
5	通话时无法听清对方说话	环境噪音过于嘈杂	尽量不要在人多嘈杂的情况下使用通话对讲

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	